

## Raskaustesti

Nopea tulos

- Havaitsee raskauden yli 99 prosentin tarkkuudella kuukautisten oletetusta alkamispäivästä alkaen.
- **Lue tämä esite huolellisesti ennen testin tekemistä.**

### 1 Ennen kuin aloitat

Kellosta voi olla apua testin tekemisen yhteydessä.

Voit tehdä testin mihin kellonaikaan tahansa, jos teet testin aikaisintaan kuukautisten oletettuna alkamispäivänä.

### 2 Tee testi

Kun olet valmis tekemään testin, poista suojakääre ja irrota suojuus. Käytä testipiukko välittömästi.

Voit testata suoraan virtsasuihkusta **tai** virtsanäytteestä, joka on kerätty puhtaaseen ja kuivaan astiaan.

- Pidä väriä vaihtava näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna **tai** kerätystä virtsanäytteestä kuvan mukaisesti **5 sekunnin ajan**.
- Väriä vaihtava näytteenottopäätä muuttuu välittömästi vaaleanpunaiseksi sen merkiksi, että virtsa imeytyy siihen. **Pidä väriä vaihtava näytteenottopäätä virtsassa täydet 5 sekuntia.**



Suojuus

Väriä vaihtava näytteenottopäätä

- Pidä väriä vaihtavaa näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna tai aseta testipiukko tasaiselle alustalle, kunnes olet valmis lukemaan tuloksen ja sininen viiva on ilmestynyt kontrolli-ikkunaan.



Pidä väriä vaihtava näytteenottopäätä virtsassa täydet 5 sekuntia.



Aloita ajanotto heti kun huomaat väriä vaihtavan näytteenottopäätä muuttuvan vaaleanpunaiseksi.

Virtsasuihku **TAI** Kerätty näyte

- Voit halutessasi asettaa suojuksen takaisin paikalleen.
- Jos väriä vaihtava näytteenottopäätä ei ole muuttunut täysin vaaleanpunaiseksi, katso kysymys 5.

3  
MINUUTTIA

**ODOTA 3 MINUUTTIA. Kun testi alkaa toimia, näet sinisen viivan tai viivojen tulevan näkyviin.**

### 3 Lue tulos


Voit lukea tuloksen tulosikkunasta.

**Kontrolli-ikkunassa on näyttävä sininen viiva, kun luet tuloksen. Viiva osoittaa, että testi on toiminut.**

Raskaana-tulos voi tulla näkyviin yhdessä minuutissa, kun testi tehdään väliinjääneiden kuukautisten oletetun alkamispäivän jälkeen.

Sinun on odotettava 3 minuuttia, jotta tulos **Ei Raskaana** varmistuu (katso kysymys 8).

Jos kontrolli-ikkunassa ei näy sinistä viivaa, testi ei ole toiminut (katso kysymys 6).

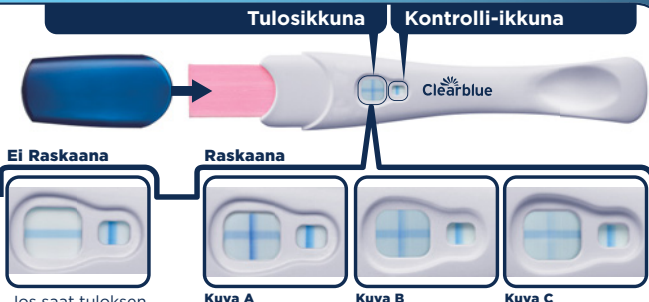

Ei Raskaana

Raskaana

Jos saat tuloksen **Ei Raskaana**, katso kysymys 10.

Kuva A

Kuva B

Kuva C

- Jos saat tuloksen **Raskaana**, katso kysymys 11.
- Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, katso kysymys 7.

**Jos toinen plus-merkin (+) muodostavista viivoista on vaaleampi tai tummempi kuin toinen, sillä ei ole merkitystä, vaan tuloksesi on Raskaana.**

**TÄRKEÄÄ!** Lue tulos **10 minuutin** sisällä testin tekemisestä. Jätä huomiotta tuloksessa tämän ajan jälkeen tapahtuvat muutokset.

# Kysymyksiä ja vastauksia

**1 Kuinka tarkka Clearblue on?**  
Laboratoriotesteissä Clearblue-testin tarkkuudeksi on osoitettu yli 99 %, kun testi tehdään aikaisintaan kuukautisten odotettuna alkamispäivänä.

**2 Kuinka Clearblue toimii?**  
Kun olet raskaana, kehosi tuottaa hCG-raskaushormonia (istukkalagonadotropiinia). hCG-hormonin määrä kehossa nousee raskauden alkuvaiheessa. Clearblue Nopea tulos tunnistaa pienetkin määrät tätä hormonia virtsassa. (Testin herkkyys on 25 mIU/ml.)

**3 En ole varma, milloin seuraavien kuukautisten on määrä alkaa. Mistä tiedän, suoritanko testin oikeaan aikaan?**  
Saat selville kuukautisten oletetun alkamispäivän, kun määrität kuukautiskierron tavallisen pituuden laskemalla päivät kuukautisten alkamispäivästä seuraavien kuukautisten alkamista edeltävään päivään.  
• Jos kuukautiskierron on epäsäännöllinen, tee testi viimeksi kuluneiden kuukausien pisimmän kierron mukaan.  
Jos tulos on Ei Raskaana ja epäilet edelleen raskautta, katso kysymys 10.

**4 Voiko lääkitys tai terveydentila vaikuttaa tulokseen?**  
Lue aina käyttämiäsi lääkkeiden käyttöohjeet ennen testin tekemistä.  
• HCG-hormonia sisältävä hedelmällisyyslääkitys saattaa vääristää tuloksia (tällainen hedelmällisyyslääkitys annetaan yleensä pistoksena, ja testaaminen liian pian lääkkeen saamisen jälkeen voi antaa virheellisen Raskaana-tuloksen).  
• Muiden hedelmällisyyshoitojen (kuten klomifeenisitraatti), särkylläkkeiden ja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden (kuten ehkäisytabletit) ei pitäisi vaikuttaa tulokseen.  
• Jos olet vastikään lopettanut hormonaalisen ehkäisyn tai käytät hedelmällisyyshoitoja, kuten klomifeenisitraattia, kuukautiset voivat olla epäsäännölliset, jolloin saatat testata liian aikaisin.  
• Jos olet äskettäin ollut raskaana (vaikka raskaus olisi keskeytynyt ennenaikaisesti), voit saada virheellisen Raskaana-tuloksen.  
• Kohdunulkoinen raskaus, munasarjakystat, vaihdevuodet ja tietyt hyvin harvinaiset sairaudet voivat vääristää tuloksia.  
• Jos saat Raskaana-tuloksen, on mahdollista, että myöhemmin toteat, että et ole raskaana, mikä johtuu raskauden luonnollisesta keskeytymisestä, jota voi esiintyä raskauden alkuvaiheessa.  
Jos saat odottamattomia tuloksia, keskustele niistä lääkärin kanssa.

**5 Tein raskaustestin, mutta väriä vaihtava näytteenottopää ei muuttanut kokonaan vaaleanpunaiseksi. Mitä minun pitäisi tehdä?**  
Jos väriä vaihtava näytteenottopää ei ole muuttanut täysin vaaleanpunaiseksi, virtsan määrä on voinut jäädä liian vähäiseksi. Testi on kuitenkin toiminut, jos kontrolli-ikkunaan ilmestyy sininen viiva 10 minuutin sisällä testin tekemisestä. Jos kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa testin tekemisestä, katso kysymys 6.

**6 Tein raskaustestin, mutta kontrolli-ikkunaan ei ilmestynyt sinistä viivaa. Mitä minun pitäisi tehdä?**  
Jos kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa 10 minuutin kuluessa testin suorittamisesta, testi ei ole toiminut. Synnä voi olla:

• Et pitänyt väriä vaihtavaa näytteenottopäää alaspäin suunnattuna tai asettanut testin vaakatasoon testauksen jälkeen.  
• Virtsassa oli liikaa tai liian vähän. **Testiä on pidettävä näytteessä 5 sekuntia.**  
Tee testi uudelleen käyttämällä uutta testipuikkoa ja huolehdi, että noudatat ohjeita. Voit halutessasi kerätä virtsanäytteen puhtaaseen, kuivaan astiaan ja upottaa näytteesseen vain väriä vaihtavaa näytteenottopää 5 sekunniksi.

**7 Mitä, jos olen epävarma tuloksesta?**  
• Raskaana-tulos edellyttää, että 10 minuutin sisällä testin tekemisestä kontrolli-ikkunaan tulee näkyviin sininen viiva ja tulossikkunaan plusermerkki (+).  
Plus-merkin (+) ulkoasu tulossikkunassa voi vaihdella, mutta plus-merkin muodostavien viivojen ja kontrolli-ikkunaan viivan tulee kuitenkin olla leveydeltään samanlaisia (katso kuvat A-C).

**Kuva A**  
Viiva näyttää tältä todennäköisimmin silloin, kun olet raskaana ja teet testin monta päivää kuukautisten väliinjäämisen jälkeen, jolloin hCG-pitoisuudet ovat suuremmat.

**Kuva B**  
Tämä ei ole epätavallista, kun olet raskaana ja teet testin kuukautisten oletettuna alkamispäivän tai hiukan sitä ennen tai sen jälkeen, jolloin hCG-pitoisuudet ovat edelleen suhteellisen pienet.

**Kuva C**  
Vaikka viivat olisivat vaaleita, tämä tarkoittaa silti Raskaana-tulosta.  
Jos olet edelleen epävarma tuloksestasi, odota vähintään 3 päivää ennen kuin testaat uudelleen ja huolehdi, että noudatat ohjeita.  
• Ei Raskaana -tulos edellyttää, että 10 minuutin sisällä testin tekemisestä kontrolli-ikkunaan tulee näkyviin sininen viiva ja tulossikkunaan miinusmerkki (-). Jos tulos on Ei Raskaana ja epäilet edelleen raskautta, katso kysymys 10.

**8 Milloin voin lukea tuloksen?**  
Raskaana-tulos voi tulla näkyviin yhdessä minuutissa, kun testi tehdään väliinjääneiden kuukautisten oletetun alkamispäivän jälkeen. Varmista ennen tuloksen lukemista, että kontrolli-ikkunassa on sininen viiva. Sinun on odotettava 3 minuuttia, jotta tulos Ei Raskaana varmistuu. Jos kontrolli-ikkunaan ei tule sinistä viivaa **10 minuutin** kuluessa, testi ei ole toiminut (katso kysymys 6).

**9 Kuinka kauan tulos kestää?**  
Tulos voidaan lukea 3–10 minuutin aikana. Kymmenen minuutin jälkeen tuloksessa tapahtuvat muutokset on jätettävä huomiotta.

**10 Testin mukaan en ole raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?**  
Et ehkä ole raskaana tai raskaushormonipitoisuus ei ole vielä riittävä suuri, jotta testi tunnistaisi sen, tai olet ehkä laskenut väärin kuukautisten odotetun alkamispäivän.  
• Jos teit testin varhain, tee se uudelleen kuukautisten odotettuna alkamispäivänä.  
• Jos kuukautisesi ovat myöhässä, tee testi uudelleen kolmen päivän kuluessa. Jos tämänkin testin tulos on Ei Raskaana eivätkä kuukautisesi ole vielä alkaneet, käy lääkärissä.

**11 Testin mukaan olen raskaana. Mitä minun pitäisi tehdä?**  
Jos testi ilmoittaa, että olet raskaana, ota yhteyttä lääkäriin, joka neuvoa, mihin toimiin on syytä ryhtyä seuraavaksi.

**www.clearblue.com**  
Tuoteneuvoja on paikalla arkipäivisin kello 10–13. Suomenkielinen tuoteneuvoja ei aina ole paikalla ja puheluasi saatetaan vastata englanniksi.  
**0800 774 150**  
Lankapuhelut ovat ilmaisia, matkapuheluista saatetaan veloittaa. Kaikki puhelut nauhoitetaan ja valvotaan laadunvalvontatarkoituksessa. Varaudu ilmoittamaan pakkausikän eränumeron.

Lisäohjeita sekä raskautta koskevaa tietoa ja yleistä neuvontaa saat osoitteesta: [www.clearblue.com](http://www.clearblue.com)

	Valmistaja		Ei saa käyttää uudelleen.
	Eräkoodi		In vitro -diagnostinen lääketieteellinen laite
	Viimeinen käyttöpäivä		Lämpötilarajat 2–30 °C

Tarkoitettu itsetestaukseen ja kotikäyttöön.  
Vain *in vitro*-diagnostiseen käyttöön.  
Vain ulkoiseen käyttöön.  
Ei saa käyttää uudelleen.  
Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.  
Säilytä 2–30 °C:n lämpötilassa.  
Anna lämmitä huoneenlämpöiseksi 30 minuutin ajan, jos testiä on säilytetty jääkaapissa.  
Älä käytä, jos suojakääre on vaurioitunut.  
Ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.  
Testin voi hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana.

